フリースタイル"リブラー"

FreeStyle Librer

ユーザーマニュアル【説明書・準備編】

2017/12/25

◇『フリースタイル"リブラー"』の特徴



3 リブレデー	-5										8
2017年12月16日 ~ 年月日											
В		時	ш	糖値		インスリン 量]			
日付		時刻	自動値	スキャン値	電極値	超速	効 カーボ	時効	記録種	×ŧ	
2017/12/16		13:03	317								1
2017/12/16	(13:18	348				スキャンしていない時の 🦳				
2017/12/10		13:33	373				血糖値や、インスリン、 炭水化物量を入力した 時刻が確認できる。				
2017/12/16		13:48	398								
2017/12/16	Π	14:03	398								
2017/12/16		14:18	380								
2017/12/10		14:32	423						0		
2017/12/10		14:33				2.0			4		
2017/12/10		14:33		411					1		
2017/12/10		14:47	441						0		
2017/12/10		15:02	422						0		
2017/12/10		15:17	394						0		
2017/12/16	J	15:32	361						0		
2017/12/16	6	15:47	323						0		

ユーザーマニュアル【説明書・準備編】

2017/12/25

◆使い方の概要(詳しい使い方は、操作編マニュアルをご覧下さい)





2017/12/25

ユーザーマニュアル【説明書・準備編】

1. ファイルのダウンロード

<u>http://analog-kai.org/Libre/FreeStyleLibrer_2017_12_25.accdb</u> をクリックして、ソフトウエア本体のファイルをダウンロードします。[約 1.2MB]

2. Access2007ランタイムファイルのダウンロード

ソフトウエア本体は、Access2007 で作られているので、動かす為のソフト、AccessRuntime.exe <u>https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=4438</u>をダウンロードします。[約 62MB]

3. Access2007ランタイムのインストール

ダウンロードした Ac2007Runtime.exe をダブルクリックして実行します。



以下の画面が表示されるので、しばらく待ちます。

Microsoft Office Access Runtime (Japanese) 2007



フリースタイル"リブラー"

FreeStyle Librer

2017/12/25

ユーザーマニュアル【説明書・準備編】

以下の画面になったら、OKをクリックします。



4. アボット公式ソフト「FreeStyle リブレ」を起動し、ファイルのエクスポートを行います。(既にエクスポートが終っていれば、5. 『フリースタイル"リブラー"の準備』に進んで下さい。

-2-

ダブルクリック



デスクトップの「FreeStyle リブレ」アイコンをダブル クリックして、ソフトを起動します。



リブレリーダーがパソコンに接続されていな い場合、左の画面になるので、図の通りリブ レリーダーとパソコンを マイクロUSBケー ブルで接続します。



画面左上の「ファイル」をクリック し、「データをエクスポートする」 をクリックします。

※エクスポートとは、"データを外 に出す"という意味です。 ユーザーマニュアル【説明書・準備編】

2017/12/25



ファイルの保存画面になります。

できれば、ローカルディスク(C:) や、Dドラ イブがある方は、そこに新しいフォルダーを 作る事をおすすめします。

「ローカルディスク(C:)」をクリックし、次 に「新しいフォルダー」をクリックします。



「新しいフォルダー」ができるので、名前を 「フリースタイルリブレ」※好きな名前でか まいません。 に変更します。

フォルダー名を入力したら、フォルダーをダ ブルクリックします。

ダブルクリック



ファイル名に、ファイルの名前を入力して、 「保存」をクリックします。

名前は何でもかまいませんが、日付を入れて おくと良いと思います。

【メモ】

リーダーの説明書には、過去90日分のデータ が記録されている→ここでは、それが保存さ れますが、1日のスキャン回数が少なければ、 それ以上記録が残っています。

2017/12/25

ユーザーマニュアル【説明書・準備編】

5. 「フリースタイル"リブラー"」の準備

1. でダウンロードしたFreeStyleLibrer_2017_12_25. accdb をダブルクリックで起動します。



以下のような画面になります。

セキュリティの警告画面が表示されますが、Cancel を選択すると使えないので。。Open をクリック して下さい。



FreeStyle Librer

ユーザーマニュアル【説明書・準備編】

2017/12/25



-5-